

OtriNatura Aloe Vera

Burun Spreyi

İzotonik Deniz Suyu

OtriNatura Aloe Vera burun spreyni kullanmadan önce lütfen talimatları dikkatlice okuyunuz. Sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

1. OTRINATURA ALOE VERA burun spreyi nedir ve ne için kullanılır?

OtriNatura Aloe Vera, koruyucu içermeyen doğal izotonik deniz suyu çözeltisidir. Ayrıca yatıştırıcı ve nemlendirici etkisi olan doğal aloe vera bitkisi tozu içerir.

OTRINATURA ALOE VERA'nın kullanıldığı durumlar:

- Soğuk algınlığı ve alerji gibi durumlara bağlı burun tıkanıklığında fazla mukusu ve alerjen parçacıkları (toz ve polen gibi) yıkama yoluyla uzaklaştırarak burnu nazikçe temizler.
- Tahriş olmuş burun kanallarını rahatlatır.
- Düşük nem oranı ya da hafif burun tahrişi nedeniyle kurumuş veya tahriş olmuş burun mukozasını (sıcak veya klimalı odalar, yüksek irtifa, uçak seyahati gibi durumlardaki) nemlendirir.
- Burun akıntısını azaltıp incelterek burundan uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

OTRINATURA ALOE VERA günlük burun temizliği için uygundur.

2. OTRINATURA ALOE VERA burun spreyi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

İçindeki maddelerden herhangi birine alerji durumunda ürünü kullanmayınız. Püskürtme ucunu mikrodalgada sterilize etmeyin. Ürün kullanma talimatına uygun şekilde kullanıldığı takdirde özel bir önlem alınmasına gerek yoktur. Ancak, bir burun ameliyatı ya da yaralanmasını takiben spreyi kullanmadan önce bir doktora danışınız.

OTRINATURA ALOE VERA, başka bir burun ürünüyle birlikte kullanılırken, temizleyici özelliğinden dolayı ilk olarak kullanılmalıdır (soğuk algınlığı veya alerjik rinit için).

OTRINATURA ALOE VERA, gebelik ve emzirme süresince kullanılabilir.

Kırılmış veya hasarlı ürünü kullanmayınız.

3. OTRINATURA ALOE VERA burun spreyi nasıl kullanılır?

2 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinler için: Spreyin basıncı dikkatli ve nazik bir şekilde tıkalı ve akan burununuza temizler. Ayrıca bu sprej burun deliklerinizi nemlendirir. 11 yaş altındaki çocuklarda bir yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır. Yaşlılar ya da engelliler ürünü kullanırken bir yetişkinin desteğine ihtiyaç duyabilirler. Her bir burun deliğine 1-2 defa 1 püskürtme.

Gerekli olduğunda işlem tekrarlanabilir. Hijyen için, kontaminasyondan kaçınmak üzere, sprej sadece bir kişi tarafından kullanılmalıdır.

Kullanma talimatları

1. Gerekli ise burnunuzu temizleyiniz.
2. Spreyin koruyucu kapağını çıkartınız.
3. Sprej uzun süredir kullanılmadıysa, kullanımdan önce spreji havaya bir defa püskürtünüz. Eğer püskürtme ucu tıkalı ise, ucu akan temiz su ile yıkayın ve ardından temiz bir bez ile kurulayınız.
4. *Çocuklarda kullanım (ürünü yalnız kullanamayanlar için)
Çocuğu sırt üstü yatırıp başını yan pozisyona getirerek uygulama yapılır. Böylelikle sıvının daha kolay akışını sağlayınız, bkz. Şekil 1.
*Çocuklar ve yetişkinlerde kullanım (ürünü yalnız kullanabilenler için)
Başınızı hafifçe öne ve bir yana eğerek yatay pozisyon alınız, bkz. Şekil 2.
5. Püskürtme ucunu burun deliğimize yerleştiriniz ve püskürtünüz. (2-3 saniye)
6. İşlemi diğer burun deliği için de başı diğer tarafa eğerek tekrar ediniz.
7. Ürünün etkisini göstermesi için birkaç saniye bekleyin. Bu sürede burnunuzu temizlemeyiniz, ama gerekirse siliniz.
8. Sonrasında gerekirse burnunuzu temizleyiniz.
9. Her kullanımdan sonra püskürtme ucunu akan temiz su ile yıkayın ve ardından temiz bir bez ile kurulayınız ve koruyucu kapağını takınız.

10. Kimyasal madde, bulaşık deterjanı ya da dezenfektan kullanmayınız. Mikrodalgaya koymayınız.



Şekil 1



Şekil 2

4. Güvenliğiniz için

Kullanım talimatlarına uygun şekilde kullanıldığında, OTRINATURA ALOE VERA, iyi tolere edilir.

Püskürtme ucu yetişkinler ve çocukların burun deliklerine uygun şekilde dizayn edilmiştir. Koruyucu halkalı püskürtücü ucu burnun derinliklerine sokmaktan ve bundan dolayı çocukların yaralanmasından kaçının.

Bu ürünün kullanımına ilişkin ilave sorularınız olursa doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

5. OTRINATURA ALOE VERA burun spreyi'nin saklanması

Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde saklayınız.

Ürünü ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

Basınçlı tüpü güneş ışığından koruyunuz ve 50°C'nin üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayınız.

Boşaltılmış tüpü delmeyiniz veya ateşe atmayınız.

25°C'nin altında saklayınız. Buzdolabında saklamayınız. Dondurmayınız.

Orijinal ambalajında saklayınız.

OtriNatura GlaxoSmithKline şirketler grubunun tescilli markasıdır.

6. Diğer bilgiler

İçindekiler:

Aloe Vera tozu, deniz suyu ve saf su.
Koruyucu içermez.

Cihaz, inert azot gazıyla basınç altında tutulmaktadır. Çözelti, itici azot gazı ile temas etmemektedir.

OTRINATURA ALOE VERA burun spreyi

100 ml'lik burun spreyi olarak kullanıma sunulmaktadır.

Üretici

Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz,
CH-1260 Nyon, İsviçre

İthalatçı firma:

GlaxoSmithKline Tüketici Sağlığı A.Ş.
Büyükdere Cad. No.173 1. Levent Plaza,
B Blok 34394 Levent, Şişli/İstanbul



444 4 083

tuketicisagligi@gsk.com



Yenileme Tarihi: Aralık 2016

TR 940182 – ANA90NC25B

