

OtriNatura

Plus Okaliptus

Doz Ayarlı Burun Spreyi

Esansiyel Okaliptus Yağı İçeren Doğal Hipertonik Deniz Suyu



OTRINATURA PLUS OKALIPTUS doz ayarlı burun spreyni kullanmadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz.

Sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Soğuk algınlığı sırasında, inflamatuvar süreç, burun mukozasında şişme, burun tıkanıklığı ve mukus artışı ile sonuçlanır. Hipertonik* deniz suyu, çözelti ve mukoz membran arasında bir basınç farkı (ozmotik etki) yaratarak burun yolundaki şişliğin azalmasına yardımcı olur. Ürün ayrıca aşırı mukus salgısını yumuşatıp, çözerek bakteri ve virüslerin burundan uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

* Hipertonik deniz suyu çözeltilerinin deniz tuzu konsantrasyonu, burun tıkanıklığını etkili bir şekilde rahatlatmak amacıyla %2.2'ye optimize edildiği için, izotonik deniz suyu çözeltilerinden farklıdır. Ayrıca bu konsantrasyon, çözeltinin burun mukozasına uyumlu olacak şekilde yeterince yumuşak olmasını sağlar.

1. OTRINATURA PLUS OKALIPTUS burun spreyi nedir ve ne için kullanılır?

OTRINATURA PLUS OKALIPTUS, doğal hipertonik deniz suyunun, esansiyel okaliptus yağı ve yabani nane özütü ile kombinasyonu olan ve koruyucu içermeyen bir burun sprevidir. Seyreltilmemiş çözelti aynı zamanda deniz suyunda bulunan tüm önemli mineral ve mikroelementlerin zenginliğini korur. Doğal, yoğun bir nazal dekonjestan olan OTRINATURA PLUS OKALIPTUS,

- Nazal şişliği azaltarak soğuk algınlığı ya da rinosinüzite bağlı burun tıkanıklığını (tıkalı ya da dolu burun) etkili, doğal bir şekilde açar.
- Aşağıdaki şekilde ilave enfeksiyon gelişimini önlemeye yardımcı olur:
 - Burun yollarını temizleyen arındırıcı etkisi

- Spreyin nazal boşluk üzerindeki etki mekanizmasıyla mukusa hapsolmuş bakteri ve virüslerin uzaklaştırılmasına yardımcı olması
- Anında rahatlama ve tazelik hissi verir.
- Kurutucu özelliği olmayıp, burun boşluklarını nemlendirir.

OTRINATURA PLUS OKALIPTUS, dekonjestan ilaçlarla tedavi ihtiyacının azalmasına yardımcı olabilir.

OTRINATURA PLUS OKALIPTUS 6 yaş üzerindeki çocuklar ve yetişkinler için uygundur.

2. OTRINATURA PLUS OKALIPTUS burun spreyi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

- Kırılmış veya hasarlı ürünü kullanmayınız. Cihaz orijinal görünümünü kaybetmişse kullanmayınız.

İçindeki maddelerden herhangi birine alerji durumunda ürünü kullanmayınız. Bir burun ameliyatı ya da yaralanmasını takiben ürünün kullanımı uygun değildir. Ürünü 6 yaşından küçük çocuklarda kullanmayınız. Ürünü gebelik ya da emzirme süresince kullanmayınız. Astminiz varsa kullanmayınız.

3. OTRINATURA PLUS OKALIPTUS burun spreyi nasıl kullanılır?

6 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinler için: Her bir burun deliğine günde en fazla 6 defa 2-3 püskürtme.

Kullanma talimatları

1. Burnunuzu temizleyiniz.
2. Kullanmadan önce şişeyi çalkalayınız.
3. Spreyin koruyucu kapağını çıkarınız, bkz. Şekil 1.
4. İlk kullanımdan önce, sprey bir defa havaya dağılına kadar birkaç pompalama hareketi yaparak pompayı kullanıma hazır hale getiriniz. Gözünüze ya da ağzınıza püskürtmemeye dikkat ediniz.
5. Şişeyi baş parmağınız tabanda ve başlık iki parmağınızın arasında olacak şekilde dik tutunuz.
6. Başınızı hafifçe öne eğerek, başlığı burun deliğinize yerleştiriniz, bkz. Şekil 2.
7. Bir yandan nefes alırken püskürtünüz ve burnunuzdan hafifçe çekiniz.
8. İşlemi diğer burun deliği için de tekrar ediniz.
9. Ürünün etkisini göstermesi için birkaç dakika bekleyiniz. Bu sürede burnunuzu temizlemeyiniz, gerekirse siliniz.

10. Sonrasında gerekirse burnunuzu temizleyiniz.



Şekil 1



Şekil 2

Hijyen için, kontaminasyondan kaçınmak üzere:

- Her kullanımdan sonra başlığı sıcak suyla yıkayıp, kurutunuz ve koruyucu kapağı tekrar kapatınız.
- Sprey sadece bir kişi tarafından kullanılmalıdır.

4. Güvenliğiniz için

Semptomlar yetişkinler ve çocuklar için 7 günden fazla sürerse bir sağlık uzmanına danışınız. Ambalajın üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

Burnunuzun tahriş olması durumunda, kullanım sırasında geçici bir karıncalanma yaşayabilirsiniz. Bu ürünün kullanımına ilişkin ilave sorularınız olursa doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

5. OTRINATURA PLUS OKALIPTUS burun spreyi'nin saklanması

Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde saklayınız.

Ürünü ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

Ürünü açtıktan sonra 6 aydan fazla kullanmayınız.

0 °C-25 °C arasında saklayınız.

Orijinal ambalajında saklayınız.

6. Diğer bilgiler

İçindekiler:

Deniz suyu (%2.2 deniz tuzu konsantrasyonunda hipertonik), yardımcı maddeler: esansiyel Eucalyptus globulus yağı, Mentha arvensis'den ekstrakte edilen mentol.

Koruyucu içermez.

İtici gaz içermez.

OTRINATURA PLUS OKALIPTUS doz ayarlı burun spreyi, 20 ml'lik doz ayarlı sprey olarak kullanıma sunulmaktadır.

Laboratoire de la Mer, Z.A.C de la Madeleine, Avenue du Général Patton, 35400 Saint-Malo, Fransa

İthalatçı firma:

GlaxoSmithKline Tüketici Sağlığı A.Ş.
Büyükdere Cad. No.173, 1.Levent Plaza, B Blok
34394 Levent, Şişli/İstanbul



444 4 083

tuketicisagligi@gsk.com



Tıbbi Cihaz

Tarih: 2020/06

