

PHARMA CODE REF: IS: 39



OtriNatura

Kids

DOZ AYARLI BURUN SPREYİ

İzotonik deniz suyu,
%0.74 Sodyum Klorür

Lütfen OtriNatura Kids Doz Ayarlı Burun Spreyi'ni kullanmadan önce kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz. Eğer herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebekler, çocuklar ve yetişkinler; mukusun birikmesi, burun mukozasının kabuklanması ve kuruması nedeniyle sıklıkla solunum güçlüğü yaşarlar. Bebeklerde mukusun fazla olması sıklıkla görülmektedir ve bu burun tıkanıklığının veya burun akıntısının semptomlarından biridir. Bu gibi durumlarda, burun akıntısını kendi temizleyemeyen bebeklerde; nefes almada, beslenmede ve uykuda zorluk ve sonrasında da sinirlilik ve gerginlik görülebilir. Burun tıkanıklığına sebep olan mukusun temizlenmesi burun tıkanıklığının önlenmesine ve azaltılmasına yardımcı olur.

1. OtriNatura Kids Doz Ayarlı Burun Spreyi nedir ve ne için kullanılır?

OtriNatura Kids Doz Ayarlı Burun Spreyi izotonik tuzlu su çözeltisidir. Burun tahrişini önlemek için tuz konsantrasyonu optimize edilmiştir. Çözelti nemlendirici ve yumuşatıcı özelliklere sahip olduğu bilinen hint yağı (macrogol glycerol hydroxystearate) içerir. OtriNatura Kids Doz Ayarlı Burun Spreyi aşağıdaki durumlarda önerilir:

- Soğuk algınlığı ve alerji gibi durumlara bağlı burun tıkanıklığında fazla mukusu ve alerjen parçacıkları (toz ve polen gibi) yıkama yoluyla uzaklaştırarak burnu nazikçe temizler.
- Düşük nem oranı ya da hafif burun tahrişi nedeniyle kurumuş veya tahriş olmuş burun mukozasını (sıcak veya kımali odalar, yüksek irtifa, uçak seyahati gibi durumlardaki) nemlendirir.
- Burun akıntısını azaltıp inceltmek burundan uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

2. OtriNatura Kids Doz Ayarlı Burun Spreyi'ni kullanmadan önce nelere dikkat edilmelidir?

 Kullanmadan önce kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz.

OtriNatura Kids Doz Ayarlı Burun Spreyi bir kuaterner amonyum olan benzalkonyum klorür içerir ve bu maddeye karşı hassasiyeti olan kişilerde lokal olarak alerjiye neden olabilir. Ürünü içeriğindeki maddelerden herhangi birine alerjiniz varsa kullanmayınız (Bkz. İçindekiler).

 Kırılmış veya hasar görmüş ürünü kullanmayınız.

Bu ürün kişisel kullanım içindir. Burun ameliyatı ya da yaralanmasını takiben ürünün kullanımı uygun değildir. OtriNatura Kids Doz Ayarlı Burun Spreyi, başka bir burun ürünüyle birlikte kullanılırken, temizleyici özelliğinden dolayı ilk olarak kullanılmalıdır (soğuk algınlığı veya alerji için).

OtriNatura Kids Doz Ayarlı Burun Spreyi, gebelik ve emzirme süresince kullanılabilir, ürünü kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

3. OtriNatura Kids Doz Ayarlı Burun Spreyi nasıl kullanılır?

Genel kullanım sıklığı her bir burun deliğine günde 2-4 defadır.

Bebek, çocuk ve yetişkinlerin kullanımı için uygundur. İki haftadan küçük bebekler için kullanmadan önce tıbbi yönlendirme alınır.

11 yaş altındaki çocuklar OtriNatura Kids Doz Ayarlı Burun Spreyi'ni kullanırken ebeveyn gözetiminde olmalıdır. Yaşlı ya da engelli kişiler cihazı kullanırken bir yetişkinden destek almaları gerekebilir.

Bebek ve küçük çocuklar için (2 yaşa kadar): Her bir burun deliğine 1 kez püskürtme yapılır.

Yetişkin ve çocuklar için (2 yaş ve üzeri): Her bir burun deliğine 1 veya 2 kez püskürtme yapılır.

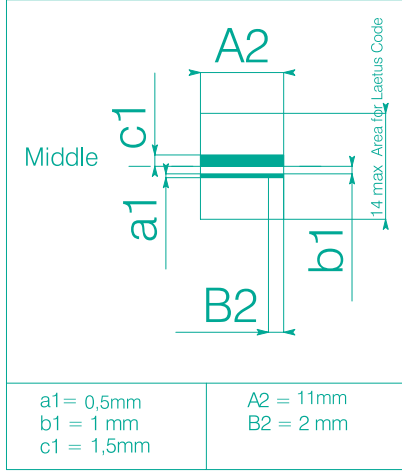
Genel kullanım sıklığı: Her bir burun deliğine günde 2-4 defadır.

Hijyenik nedenlerle ve kontaminasyondan kaçınmak için sprey sadece bir kişi tarafından kullanılmalıdır.



1. Gerekli ise burnunuzu temizleyiniz.
2. OtriNatura Kids Doz Ayarlı Burun Spreyi'ni kullanmadan önce ve kullandıktan sonra ellerinizi dikkatlice yıkayınız.
3. Spreyin koruyucu kapağını çıkarınız.
4. Spreyi baş parmağınızla tabanından tutarak püskürtme ucunu işaret ve orta parmağınız arasına alınız. İlk kullanımdan önce tam bir püskürtme çıkana kadar spreyi havaya birkaç kez püskürtürerek doz ayarlı burun spreyini hazırlayınız. Bu şekilde kullanıma hazırdır.
5. Püskürtme ucunu burun deliğinize yerleştiriniz. Nefes alırken aynı zamanda bir puf püskürtünüz. Aynı işlemi diğer burun deliğine de uygulayınız.
6. Her kullanımdan sonra püskürtme ucunu temiz bir bez ile kurulayınız ve koruyucu kapağını takınız.

5049792 TR

General Description for Laetus Code



DELPHARM	
Site Industriel de Huningue / 26, rue de la Chapelle / F 68330 -Huningue	
Title : Leaflet 148 x 210 (folded 148 x 28 mm)	
Product :	Date :
Material N°:	Country :
Laetus code :	Edge Mark : 8 x 2 mm
Colours : Black	
Additional Information : RECTO	

V3 01 - FEB - 2022		Artwork Information Panel													
D2A <input type="checkbox"/>	Non Production <input type="checkbox"/>	Production <input checked="" type="checkbox"/>	SGS No: 6616082												
Total Number of Colours including Varnish & Foils: 1			CHAMPS No: 0000010001												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">1. Black</td> <td style="width: 16.6%;">2.</td> <td style="width: 16.6%;">3.</td> <td style="width: 16.6%;">4.</td> <td style="width: 16.6%;">5.</td> <td style="width: 16.6%;">6.</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>8.</td> <td>9.</td> <td>10.</td> <td>11.</td> <td>12.</td> </tr> </table>			1. Black	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Manufacturing Site: Delpharm Huningue
1. Black	2.	3.	4.	5.	6.										
7.	8.	9.	10.	11.	12.										
Total Special Finishes: 0			Site Component No: 5049792 TR												
			Approving Market: Turkey-TUR												
			Site Change Control No: GSK PA0000010001												
			Product Market Trade Name: OTRINATURA OTRINATURA												
			Component Type: Leaflet												
			Technical Drawing No: LEAFLET A2 : 148x210mm												
			Material Spec No: 5049792 TR TS LFT												
			Print Process: Offset - Lithography												
			Pharma Code No: 39												
			Barcode No:												
			Bar Width Reduction:												
			Formulation Code: NA												
			Body Text Size: 8.0pt												
			Leading: 9.0pt												
			Micro Text: N												
			Horizontal Scale: 100%												
			Smallest Text Size: 8.0pt												
Studio Location: Coimbatore, IN															

4. Güvenliğiniz için

Kullanım talimatlarına uygun şekilde kullanıldığında, OtriNatura Kids Doz Ayarlı Burun Spreyi, iyi tolere edilir. Bu ürünün kullanımına ilişkin ilave sorularınız olursa doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

5. OtriNatura Kids Doz Ayarlı Burun Spreyi'nin saklanması

Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde saklayınız.

Ürünü ambalaj üzerindeki son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

Orijinal ambalajında saklayınız.


 Isıdan koruyunuz.

6. İlave bilgiler

İçindekiler: % 0,74 sodium chloride, macrogol glycerol hydroxystearate, benzalkonium chloride, disodium edetate, sodium dihydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate anhydrous ve purified water.

OtriNatura Kids 15 ml'lik doz ayarlı burun spreyi olarak kullanıma sunulmaktadır.

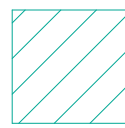
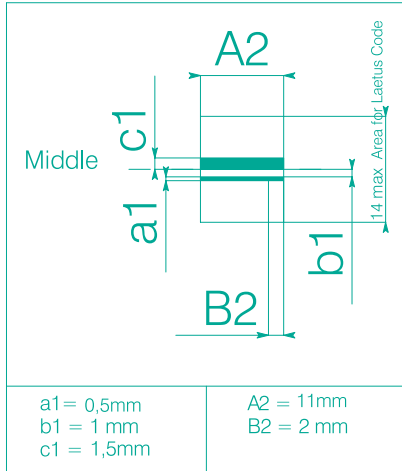
İthalatçı Firma:
GlaxoSmithKline Tüketici Sağlığı A.Ş.
Büyükdere Cad. No:173 1.Levent
Plaza B Blok 34394 Levent-Şişli/İstanbul

 GSK Consumer Healthcare SARL,
Route de l'Etraz, 1197 Prangins, Switzerland

 Tıbbi Cihaz

Tarih: Ocak 2021

5049792 TR

General Description
for Laetus Code

Text zone

DELPHARM

Site Industriel de Huningue / 26, rue de la Chapelle / F 68330 -Huningue

Title : Leaflet 148 x 210 (folded 148 x 28 mm)

Product :

Date :

Material N°:

Country :

Colours : Black

Additional Information : VERSO

V3

01 - FEB - 2022



Artwork Information Panel



D2A

Non Production

Production

X

SGS No:
6616082CHAMPS No:
0000010001

Total Number of Colours including Varnish & Foils: 1

Manufacturing Site:
Delpharm HuningueSite Component No:
5049792 TRApproving Market:
Turkey-TURSite Change Control No:
GSK PA0000010001Product Market Trade Name:
OTRINATURA OTRINATURAComponent Type:
LeafletTechnical Drawing No:
LEAFLET A2 : 148x210mmMaterial Spec No:
5049792 TR TS LFTPrint Process:
Offset - LithographyPharma Code No:
39

Barcode No:

Bar Width Reduction:

Total Special Finishes: 0

Formulation Code:
NABody Text Size: 8.0pt
Leading: 9.0ptMicro Text:
NHorizontal Scale: 100%
Smallest Text Size: 8.0pt

Studio Location: Coimbatore, IN

AIP_CHAMPS_2019_Version 1